




neodisher® Septo PreClean



Απολυμαντικό με καθαριστική δράση για θερμοανθεκτικά και θερμοευαίσθητα εργαλεία για χρήση με βυθισμό και σε πλυντήρια υπερήχων

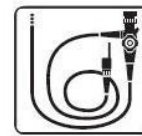

Υγρό για χειρωνακτική πρόπλυση και προαπολύμανση θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων εύκαμπτων ενδοσκοπίων και χειρουργικών εργαλείων πριν την μηχανική επεξεργασία. **Κατάλληλο για πολύωρη εμβάπτιση χειρουργικών και οδοντιατρικών εργαλείων έως 72 ώρες.**

Το απολυμαντικό του φάσμα περιλαμβάνει: **βακτηρίδια (Gram+, Gram-), μύκητες, ιούς (HIV, HBV, HCV, Vaccinia)**. Ο χρόνος απολύμανσης για πλήρες απολυμαντικό φάσμα είναι **15 λεπτά σε δοσολογία 1%**. Το ενεργό διάλυμα neodisher Septo PreClean μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 7 ημέρες ανάλογα με τα επίπεδα οργανικού φορτίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Για καθαρισμό και απολύμανση προσθέστε σε κρύο νερό βρύσης (20° C περίπου) **neodisher Septo PreClean** αντιστοιχίζοντας τον απαιτούμενο χρόνο απολύμανσης με την (%) δοσολογία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ποσότητα νερού	Δοσολογία neodisher Septo PreClean 1% - 15 λεπτά
1 λίτρο	10 ml
2 λίτρα	20 ml
5 λίτρα	50 ml
10 λίτρα	100 ml

2. **Ανοίξτε όλα τα εργαλεία με αρθρώσεις.** Αποσυναρμολογήστε πλήρως εργαλεία που αποτελούνται από διάφορα εξαρτήματα. Βυθίστε πλήρως τα εργαλεία στο έτοιμο διάλυμα.
3. **Αφήστε** τα εργαλεία στο διάλυμα για **15 λεπτά**. Αν χρειαστεί, με μια **μαλακή βούρτσα** απομακρύνετε ακαθαρσίες από αρθρώσεις και «κρυφά» σημεία.
4. **Ξεπλύνετε** προσεκτικά όλα τα εργαλεία με άφθονο τρεχούμενο νερό και **στεγνώστε** τα σχολαστικά με μαλακό πανί.
5. **Συντηρήστε** όλα τα εργαλεία με ένα **υδατοδιαλυτό λιπαντικό σπρέϋ** ειδικά στις αρθρώσεις.
6. Ελέγξτε τα εργαλεία για σωστό καθαρισμό ή λειτουργία. Απομακρύνετε από το σετ όσα εργαλεία δεν λειτουργούν ή δεν έχουν καθαριστεί σωστά.
7. Πριν την αποστείρωση, κλείστε στην πρώτη σκάλα εργαλεία με αρθρώσεις και πακετάρετε όλο το σετ με τον σωστό τρόπο.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν αλδεύδες πριν ή μετά την απολύμανση με το neodisher Septo PreClean.

Αριθμός Καταχώρησης ΕΜΧΠ: 29338
Ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE (κατηγορία IIb)



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlentagen 85, D – 20539 Hamburg

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ85/1348