




neodisher® Septo PreClean

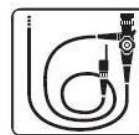

Καθαριστικό και απολυμαντικό για την επανεπεξεργασία με βυθισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων



Αποτελεσματικότητα κατά οργανισμών – στόχων

Εργαστηριακές Μελέτες

Αριθμός μελέτης	Μέθοδος αναφοράς	Χρόνος δράσης	Δοσολογία / θερμοκρασία	Είδος τεστ / Ειδικές συνθήκες	Στελέχη
Βακτηριοκτόνος δράση					
GD 4066/01-05	EN 1040 (phase 1)	5 λεπτά	0,5% 20°C	➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης	➤ Staphylococcus aureus ➤ Pseudomonas aeruginosa
GD 4066/02-16	EN 13727 (phase 2 - step 1)	15 λεπτά ή 5 λεπτά	0,5% 1,5% 20°C	➤ Ποσοτικό τεστ φορέα ➤ Ρυπαρές συνθήκες	➤ Staphylococcus aureus ➤ Pseudomonas aeruginosa ➤ Enterococcus hirae
GD 4066/02-10	EN 14561 (phase 2 - step 2)	15 λεπτά	0,5% 20°C	➤ Ποσοτικό τεστ φορέα ➤ Ρυπαρές συνθήκες	➤ Staphylococcus aureus ➤ Pseudomonas aeruginosa ➤ Enterococcus hirae
Βακτηριοκτόνος δράση					
GD 4066/01-07	EN 13727 (phase 2 - step 1)	10 λεπτά	0,5%	➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ High organic blood ➤ Σταθερότητα διαλύματος 7 ημέρες	➤ Pseudomonas aeruginosa
Μυκητοκτόνος / ζυμοκτόνος δράση					
GD 4066/03-05	EN 1275 (phase 1)	5 λεπτά	0,5% 20°C	➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης	➤ Candida albicans
GD 4066/04-05 GD 4066/01-16	EN 13624 (phase 2 - step 1)	5 λεπτά	0,5% 20°C	➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Ρυπαρές συνθήκες	➤ Candida albicans
GD 4066/03-10	EN 14562 (phase 2 - step 2)	5 λεπτά	0,5% 20°C	➤ Ποσοτικό τεστ φορέα ➤ Ρυπαρές συνθήκες	➤ Candida albicans



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg


ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ85/1348



neodisher® Septo PreClean



Καθαριστικό και απολυμαντικό για την επανεπεξεργασία με βυθισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων

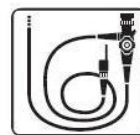

Αποτελεσματικότητα κατά οργανισμών – στόχων

Αριθμός μελέτης	Μέθοδος αναφοράς	Χρόνος δράσης	Δοσολογία / θερμοκρασία	Είδος τεστ / Ειδικές συνθήκες	Στελέχη
Ιοκτόνος δράση					
GD 4066/05-16	DVV-RKI	15 λεπτά	0,5% 20°C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές και ρυπαρές συνθήκες 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BVDV*
GD 4066/06-16	DVV-RKI	15 λεπτά	1%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BVDV* ➤ Vaccinia virus
GD 4066/01-19	EN 14476 (phase 2 - step 1)	15 λεπτά	0,5%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Ρυπαρές συνθήκες 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vaccinia virus (Ankara)
GD 4066/01-20	EN 17111 (phase 2 - step 2)	15 λεπτά	1,5%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ποσοτικό τεστ φορέα ➤ Ρυπαρές συνθήκες 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vaccinia virus (Ankara)

*Ιός ταυτοποιημένος για την δράση του απολυμαντικού έναντι της Ηπατίτιδας C



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ85/1348