


WIP'ANIOS EXCEL



- 100% βιοδιασπώμενα μαντηλάκια βισκόζης
- Διάλυμα εμποτισμού: σύνθεση χωρίς άρωμα και αλκοόλες
- Ευρύ αντιικό φάσμα
- Αντιμικροβιακή δραστηριότητα από τα 2 λεπτά
- Υψηλή συμβατότητα με εξοπλισμό

**ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

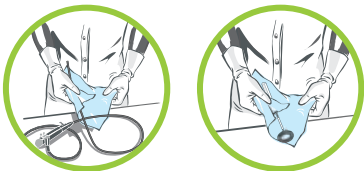

Μαντηλάκια βισκόζης

100%
βιοδιασπώμενα



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Επεξεργασία μη εμβλαπτιζόμενων και μη επεμβατικών ιατροτεχνολογικών συσκευών*. Καθαρισμός στελεχών ενδοσκοπίων κατά την προεπεξεργασία πριν την εμβάπτιση για καθαρισμό και απολύμανση.

* Παραδείγματα: κεφαλές υπερήχων, αισθητήρες πίεσης, ελεγκτές σακχάρου στο αίμα, συσκευές παρακολούθησης πίεσης, ανακλαστικά σφυριά...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: 100% βισκόζη
Διαστάσεις: 180 x 200 mm

ΣΥΣΤΑΣΗ


Μαντηλάκια εμποτισμένα με απορρυπαντικό και απολυμαντικό διάλυμα: χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο (CAS N° 7173-51-5: 3 mg/g), μη ιονικά τασιενεργά, αποσκληρυντικό παράγοντα, έκδοχα.

WIP'ANIOS EXCEL


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Πάρτε ένα μαντηλάκι και κλείστε καλά τη συσκευασία.

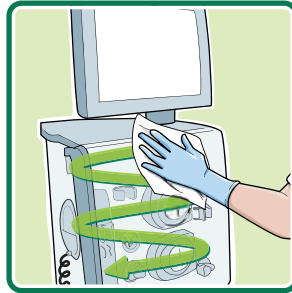

Εφαρμόστε το μαντηλάκι στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο μαντηλάκι. Σεβαστείτε τον χρόνο επαφής για την επιθυμητή δραστηριότητα.

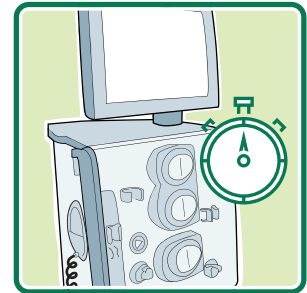

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε παρά μόνο σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής με το δέρμα ή τους βλεννογόνους. Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά από κάθε άνοιγμα.

Σημείωση: Τα WIP'ANIOS EXCEL δεν υποκαθιστούν τον καθαρισμό και την απολύμανση με εμβάπτιση, εάν αυτή είναι δυνατή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ανατρέξτε στην ετικέτα (Συντάσσεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων). Φυλάσσεται μεταξύ + 5 ° C και + 35 ° C. Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb (οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε). Για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιήστε το εντός 3 μηνών μετά το άνοιγμα.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βακτηριοκτόνο και ζυμοκτόνο σε 2 λεπτά, 20°C (EN 16615). Διάλυμα εμβάπτισης: Βακτηριοκτόνο σε 1 λεπτό, 20°C (EN 13624). Ζυμοκτόνο σε 2 λεπτά, 20°C (EN 13624). Δραστικό σύμφωνα με το EN 14476 σε 1 λεπτό, 20°C έναντι των HIV-1, PRV (υποκ. του HBV), BVDV (υποκ. του HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus και σε 5 λεπτά, 20°C, έναντι του Polyomavirus SV40

Όλη η αντιμικροβιακή δραστηριότητα του προϊόντος περιλαμβάνεται στον επιστημονικό φάκελο, διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

WIP'ANIOS EXCEL

1 6 πακέτα με 100 μαντηλάκια.....2446.655



ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

GB2446-190624-DM-Non contractual pictures